

検査内容変更のご案内

謹啓 時下益々ご隆盛のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度、血中アンモニア測定用専用容器を変更させて頂くことになりましたのでご案内申し上げます。

今後とも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願いいたします。

敬 白

記


《変更容器》 G：血中アンモニア測定用専用容器(除蛋白液入り)

《変更日》 在庫終了次第、順次変更

《変更内容》

採取容器番号	変更内容	変更後	変更前
G：血中アンモニア測定用専用容器	容器形状	下記参照	下記参照

使用前の容器は室温で保管願います。その他、採血量などに変更はございません。

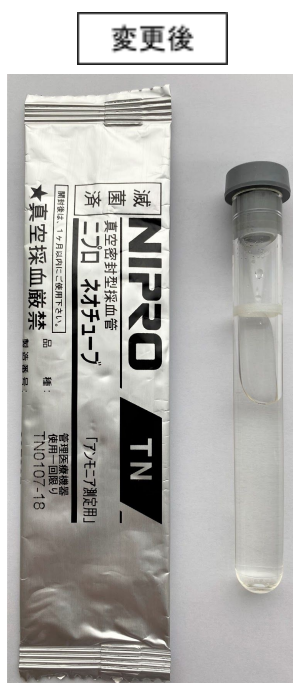

【採血手順について】

真空採血はできませんので、下記手順にてお願いします。

- ①注射器にて採血を行う。
- ②専用容器(G)へ血液を1mL正確に注入し、キャップをしっかり閉める。
- ③よく転倒混和した後、速やかに遠心分離し、上清3mLを分離用管(W)に移し、凍結して提出。

*遠心分離できない場合は、血液を1mL正確に注入し、よく転倒混和した後に、専用容器(G)を冷蔵又は氷冷で保存する。この場合は、速やかに当日内にご提出ください。