

# 検査内容変更のご案内

謹啓 時下益々ご隆盛のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

さて、この度、下記検査項目におきまして、検査内容を変更させていただくことになりましたので、ご案内申し上げます。

今後とも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願いいたします。

敬白

記

《検査項目》 [03947] カルプロテクチン(便)

《変更日》 2026年 3月 31日 (火) 受付分より

《変更内容》

検査コード	検査項目名	変更内容	変更後	変更前
03947	カルプロテクチン(便)	項目コード	05284	03947
		項目名称	便中カルプロテクチン	カルプロテクチン(便)
		検体量	糞便	糞便 1.0g
		保存条件	冷蔵	凍結
		採取容器	K-5	K
		所要日数	3~5日	4~7日
		検査方法	ラテックス凝集比濁法	FEIA法
		単位	μg/g	mg/kg
		基準値	50.0μg/g以下 炎症性腸疾患の診断補助: 50.0以下 潰瘍性大腸炎の病態把握の補助: 300.0以下 クローン病の病態把握の補助: 80.0以下	50.0mg/kg以下 炎症性腸疾患と機能性腸疾患との カットオフ値:50.0 潰瘍性大腸炎の内視鏡的活動性評価の カットオフ値:300.0 クローン病の内視鏡的活動性評価の カットオフ値:80.0
		報告上限値	2720.0以上	6000以上
		報告下限値	20.0以下	3.8以下
備考	専用容器にてご提出ください。 他項目との共用依頼はできません。	単独検体にてご提出ください。 他項目との共用依頼はできません。 採取後3日以内に凍結してご提出ください。		

※ 裏面へ続く。

## 《容器変更》

変更後  
K-5

変更前  
K



検体採取方法は、容器に添付されている説明書をご参照ください。  
糞便を採取した容器は専用の提出用袋(紫色)に入れてご提出ください。

## 《相 関 図》

